



Инструкция по эксплуатации

**LUX 620**

## Назначение

Стул для ванны Ortonica Lux 620 предназначен для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

## Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [ortonica.ru](http://ortonica.ru)

## Указания по технике безопасности

Рекомендуем перед началом использования стула для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте стул на наклонной поверхности.

Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

## Распаковка и сборка

Стул для ванной упакован в картонную коробку.

### Инструкция по сборке.

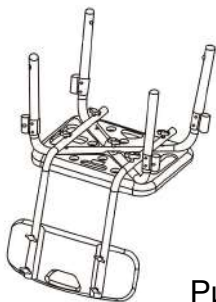


Рис. 1

1. Расположите сиденье горизонтально и установите две ножки в углубление в соответствии с рисунком. Установите спинку сиденья на раму (Рис. 1).

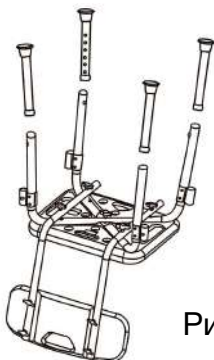


Рис. 2

2. Установите на раму в соответствии с рисунком (Рис. 2).



Рис. 3

3. Установите поручни с обеих сторон сиденья (Рис. 3).



Рис. 4

4. Отрегулируйте высоту ножек и убедитесь, что все болтовые соединения туго затянуты (Рис. 4).

# Эксплуатация стула для ванны

## Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

## Установка

У становите стул в ванной комнате. При необходимости отрегулируйте высоту ножек.

## Регулировки

Стул для ванны Lux 620 настраивается по высоте. Чтобы изменить высоту стула необходимо сжать фиксатор и установить необходимый уровень. Затем отпустить фиксатор.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Единый сервисный центр: 8 800 707 44 52


Стул для ванны Ortonica Lux 620

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай,  
2018 год ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года

 8-800-500-14-14

 ortonica.ru

 vk.com/ortonica

 @ortonica