



ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское

хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: **8 (495) 968-82-83, (916) 503-12-29**

www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ

Опоры-ходунки ортопедические регулируемые по высоте

Производитель: Чайнфитс Энтерпрайс Ко., ЛТД (Тайвань)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: **CFN-2026**

Высота опоры регулируется от 78см до 96см

Декларация о соответствии

РОСС TW.ИМ25.Д05923

Срок действия с 30.11.2011г. по 30.11.2014г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/1948

Срок действия с 07.12.2006г. по 07.12.2016 г.

ГОСТ Р 51078-97

Грузоподъемность до 135 кг

Дата выпуска_____

Дата продажи_____

Гарантийный срок эксплуатации – **1 год со дня продажи.**

Гарантия на наконечники не распространяется. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – **3 года. Срок службы – 3 года**

Отметка службы технического контроля



Штамп

Подпись

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации опор-ходунков

1. Опоры-ходунки используются для реабилитации инвалидов, обеспечивают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций.
2. Ходунки имеют складную конструкцию, изготовленную из анодированных алюминиевых трубок с лаковым защитным покрытием.
3. Надежная фиксация в рабочем положении обеспечивается кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах установлены мягкие поручни. Высота опоры регулируется через 2,5 см.
4. В конструкцию опоры-ходунка заложена функция «ШАГАНИЕ». Эта функция реализуется за счет снятия с кнопочных замков и перемещения вниз поперечной направляющей. Пациент при ходьбе, руками опираясь на поручни, поочередно переставляет одну боковую сторону, затем другую.
5. Комбинированная конструкция, совмещающая обычные ходунки и устройство для облегчения вставания.
6. При ходьбе пациенту следует переставлять ходунок вперед и, опираясь на поручни, сделать шаг.
7. Эксплуатация опоры-ходунка в случае обнаружения дефекта, возникшего в процессе эксплуатации и влияющего на прочность конструкции, запрещена.